

MODE D'EMPLOI

Coquille de Verticalisateur & Coquille de Nuit

PRÉSENTATION

- La coquille de verticalisateur maintient le tronc ou les membres dans la position correcte lors de la mise debout.
- La coquille de nuit prévient les déformations pendant le sommeil grâce à un positionnement adapté.

MISE EN PLACE

- Allongez ou asseyez le patient selon les instructions du praticien.
- Glissez la coquille sous la zone à soutenir en respectant les repères.
- Fermez les sangles dans l'ordre indiqué — commencez toujours par le centre.
- Vérifiez l'absence de plis au niveau de la peau.

PROGRAMME DE PORT

- Port de nuit : respectez strictement la durée prescrite.
- Port lors de la verticalisation : toujours sous supervision.
- Ne modifiez jamais les réglages sans avis de votre praticien.

ENTRETIEN

- Essuyez avec un chiffon légèrement humide et désinfectant doux.
- Séchez à l'air libre — jamais en plein soleil ni près d'un radiateur.
- Vérifiez l'état des mousses et des sangles à chaque utilisation.

SIGNES D'ALERTE

- Rougeur, marque ou plaie au point de contact.
- Modifications du tonus ou comportement inhabituel.
- Sangles ou boucles endommagées — ne pas utiliser.

Tél. +594 5 94 28 28 08 · contact@orthoespace3d.fr · WhatsApp disponible

En cas de doute, contactez votre orthoprothésiste avant toute utilisation.