

MODE D'EMPLOI

# Siège Moulé et Coquille d'Assise

## PRÉSENTATION

- Le siège moulé et/ou la coquille d'assise sont des dispositifs sur mesure qui maintiennent le positionnement du bassin et du tronc.
- Ils préviennent les déformations et améliorent le confort dans le fauteuil roulant ou lors de la verticalisation.

## INSTALLATION

- Installez la coquille/siège dans le fauteuil selon les repères (avant/arrière).
- Guidez l'enfant ou le patient dans la coquille en soutenant le bassin.
- Attachez le sanglage pelvien en premier, puis les sangles thoraciques.
- Vérifiez l'appui des pieds et l'alignement des genoux.

## DURÉE D'UTILISATION

- Installez le siège pour tous les temps de station assise active.
- Alternez avec des positions allongées selon le programme de kinésithérapie.
- Durée recommandée : 4 à 6 heures/jour fractionné selon prescription.

## ENTRETIEN

- Nettoyez avec un chiffon légèrement humide et désinfectant doux.
- Inspectez les mousses à chaque utilisation — remplacez si tassées ou fissurées.
- Vérifiez les sangles et les fixations hebdomadairement.

## SIGNES D'ALERTE

- Escarre ou rougeur persistante au sacrum, aux ischions ou aux hanches.
- Déséquilibre ou inclinaison nouvelle du tronc dans le siège.
- Modifications du tonus, de la posture ou du comportement de l'enfant.

Tél. +594 5 94 28 28 08 · [contact@orthoespace3d.fr](mailto:contact@orthoespace3d.fr) · WhatsApp disponible

*En cas de doute, contactez votre orthoprothésiste avant toute utilisation.*